


Bedienungsanleitung

HUWI Hubwickeltisch



HUWI KLEIN

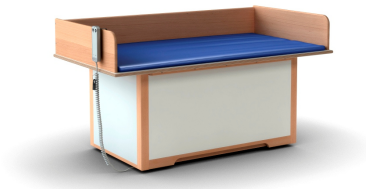

HUWI GROSS

Frei Stil
Tischlerei
Böhm und Kinstler GmbH & Co. KG

Ruppenkampstraße 16

49084 Osnabrück

Telefon: 05 41/800 39 69 0
Telefax: 05 41/800 39 69 99

www.FreiStil.com
info@FreiStil.com

Inhaltsverzeichnis

1.	Sicherheitshinweise	3
2.	Kurzbeschreibung	4
3.	Einstellen	5
4.	Höhe einstellen	6
5.	Funktionsweise der Lenkrollen	7
6.	Wartung und Pflege	8
7.	Technische Daten	9
8.	Reparatur und Service	10

1. Sicherheitshinweise

- jede Person, die mit der Bedienung und Nutzung des Wickeltisches beauftragt ist, muß diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme gelesen und verstanden haben.
- Beachten Sie die Anweisungen und bewahren Sie die Anleitung griffbereit auf!
- **Die Nichtbeachtung dieser Anleitung führt zum Verlust der Garantieansprüche!**

Der Wickeltisch entspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik und ist bei bestimmungsgemäßer Verwendung sicher.

Dennoch gehen von ihm Gefahren aus:

- wenn die Bedienung unsachgemäß erfolgt
- wenn die Bedienungsanleitung nicht beachtet wird
- wenn die zulässige Belastungen überschritten werden
- wenn der Tisch nicht bestimmungsgemäß verwendet wird
- wenn die laufende Kontrolle des technischen Zustandes nicht erfolgt
- wenn eigenmächtige Umbauten oder Veränderungen vorgenommen werden

2. Kurzbeschreibung

Der Hubwickeltisch ist ausschließlich für die Pflege durch Fachpersonal in dafür vorgesehenen Räumen geeignet.

Herausragende Eigenschaften des HUWIS sind :

- Stufenlose Höhenverstellung von 53 – 95 cm
HUWI groß 63 – 103 cm
- Abschließbarer Handschalter mit Magnetschlüssel
HUWI groß Abschließbarer Handschalter mit Magnetschlüssel
- Traglast max. 70 kg
HUWI groß 120 kg
- Liegefläche 140 x 75 cm
HUWI groß 200 x 85 cm
- Wartungsfrei

3. Einstellen

Achtung: Beim Transport des HUWI's (anheben) immer den mitgelieferten Spanngurt anlegen!

- Stellen Sie den HUWI am gewünschten Behandlungsort auf.
- Die Standsicherheit bei Unebenheiten im Fußboden läßt sich mittels der justierbaren Füße ausgleichen. Sie benötigen einen Maulschlüssel 14
- Verbinden Sie die Anschlußleitung des Motors mit der Netzsteckdose.

WARNUNG!

Elektrische Spannung! Lebensgefahr!

Netzanschlußkabel so verlegen, daß es nicht gequetscht, überrollt oder anders beschädigt werden kann! Bei beschädigter Leitung sofort den Stecker aus der Netzsteckdose ziehen und Leitung ersetzen lassen!

Vorsicht!

Bewegliche Teile! Quetschgefahr!

Beim Verstellen und Fahren des Wickeltisches müssen alle Personen Abstand vom Gestell halten! Besonders auf Arme, Hände und Füße achten!

- Unterhalb und Oberhalb des Tisches dürfen keine Gegenstände (z. B. Schuhe, Taschen, Hocker) stehen, oder an der Wand befestigt sein!
- Keine Gegenstände (z. B. Handtücher, Gurte, Kissen) im Bereich des Gestells aufbewahren.

4. Höhe einstellen

VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Ungewöhnliche Bewegung!

Patient vorher informieren und gegen Abrutschen sichern.

1. Entsperren Sie mit dem mitgelieferten Magnetschlüssel den Handschalter in dem Sie über das Schloss Symbol streichen. Durch drücken auf den Tasten können Sie den Tisch auf und ab verfahren. Nach jedem Verfahr Vorgang den Handschalter wieder mit dem Magnetschlüssel sperren.

2.

Wenn die gewünschte Höhe eingestellt ist:

- Lassen Sie die Taste des Handschalters los und sperren den Handschalter mit dem Magnetschlüssel.
-
- Der Hubspindelmotor ist für den Kurzzeitbetrieb konstruiert. Bei Überlastung wird der Motor selbsttätig ausgeschaltet, um eine Überhitzung zu vermeiden.

Nach einer Abkühlzeit ist der Motor wieder betriebsbereit.

- Nach Beendigung der Pflege immer den Magnetschlüssel an einem unzugänglichen Ort aufbewahren

5. Funktionsweise der Lenkrollen

Vorsicht! Verletzungsgefahr!

- HUWI-Wickeltisch hochfahren.
- Netzstecker ziehen!!!
- Netzstecker in den dafür vorgesehenen Haken einhängen (unterhalb der Platte)
- Mit der Handkurbel (rechtsherum) den HUWI anheben (4-5 Umdrehungen)
- Handkurbel abziehen!!!
- Den Wickeltisch an den gewünschten Ort bringen
- Mit der Handkurbel (linksherum) den Tisch absetzen. Sicherstellen, daß er auf den Sockelfüßen steht.
- Handkurbel abziehen!!!
- Netzstecker vom Haken nehmen und einstecken

VORSICHT!

Die Benutzung des Wickeltisches im angehobenen Zustand der Transportrollen ist nicht gestattet.

6. Wartung und Pflege

Der Wickeltisch ist Wartungsfrei

Reinigung des Tisches

Vorsicht!

Brandgefahr und Vergiftungsgefahr!

Der Wickeltisch darf **nicht** mit Lösungsmitteln, z. B. Verdünnungsmitteln, Benzin u. a. gereinigt werden!

- Die Reinigung kann mit einem feuchten Seifentuch erfolgen.

- Die Reinigung und Desinfektion des Wickeltisches einschließlich einer Wickelaufgabe darf mit einem geeignetem Desinfektionsreiniger erfolgen (Anwendungskonzentrat beachten!)
Wir schlagen folgendes Desinfektionsmittel vor:
Microbac Forte der Firma Bode Hamburg Tel. 040-540060
- **Niemals den Wickeltisch mit fließendem Wasser abwaschen!**

7. Technische Daten

Vorsicht!

Der Wickeltisch darf technisch nicht verändert werden!

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Der Hubtisch ist ausschließlich für die Pflege durch Fachpersonal in dafür vorgesehenen Räumen geeignet.

Metallgestell:	Winkelstahl
Gelenklager:	Gleitlager
Liegefläche und Korpusse:	Spanplatte weiß beschichtet Massivholz Buche geölt

Maße in cm:

Maße Liegefläche: 140 x 75 cm

HUWI groß 200 x 85 cm

Maße Hubwickeltisch:

Länge :	146 cm	HUWI groß 206 cm
Breite:	78 cm	HUWI groß 88 cm
Höhe:	67 cm /	

Verstellhöhe: 53 – 95 cm **HUWI groß 63 – 103 cm**

Elektronik: Gleichspannung 24 Volt
Anschlußspannung 230 V

Max. Belastung: 70 kg / **HUWI groß 120 kg**

Gewicht gesamt: 105 kg / **HUWI groß 150 kg**

Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten!



8. Reparatur / Service

Frei Stil
Tischlerei GMBH & Co. KG
Jasper Böhm
Reinhard Kinstler

Ruppenkampstraße 16

49084 Osnabrück

Telefon: 05 41/800 39 69 0
Telefax: 05 41/800 39 69 99

www.FreiStil.com
info@FreiStil.com