

DESINFEKTIONSMITTEL FÜR OBERFLÄCHEN

INHALT

Handelsübliche Desinfektionsmittel im Eigentest	2
Desinfektionsmittel für das Eingreifschutz-Rollo (Lieferanteninformation)	3




HINWEISE FÜR ENDVERBRAUCHER

DESINFEKTIONSMITTEL

FÜR OBERFLÄCHEN

 Bitte verwenden Sie das jeweilige Mittel immer vorsichtig und lesen vor dem Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen.

 Bewahren Sie Desinfektionsmittel immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf und vermeiden Augenkontakt.

 Unabhängig von den hier aufgeführten Produktempfehlungen, sollte immer vor der Anwendung an unauffälliger Stelle getestet werden, um Materialverträglichkeit und Farbestabilität zu sichern.



HANDELSÜBLICHE DESINFEKTIONSMITTEL IM EIGENTEST

Wir stellen in unserer Tischlerei in Osnabrück seit über 20 Jahren Therapie- und Pflegebetten für Kinder her. Dank unserer langjährigen Erfahrung und der engen Zusammenarbeit mit unseren autorisierten Fachhandelspartnern im In- und Ausland wissen wir, dass unsere Betten zu einem Großteil im häuslichen Umfeld (Anwendungsumgebung 4 gemäß DIN EN 60601-2-52 / DIN EN 50637) genutzt werden. Um für diese Umgebung benutzergerechte Informationen bereitzustellen zu können, haben wir umfangreiche Tests mit diversen handelsüblichen Desinfektionsmitteln aus dem Einzelhandel vorgenommen. Hierbei haben wir unsere geölten sowie lackierten Holzoberflächen, Kunststoffscheiben aus Polycarbonat und unser Kunstleder getestet. Folgende Mittel kamen hierbei zum Einsatz und führten zu folgenden Ergebnissen:

Marke	Nr.	Produktname	Einwirkzeit (Herstellerangaben)	Einwirkzeit (beim Test)	Desinfektionsmittel geeignet				Hinweise
					Holzoberflächen geölt	Holzoberflächen lackiert	Kunstleder	Kunststoffscheiben (Polycarbonat)	
Denkmit	1	Desinfektionsspray universal, 250 ml	30/60 Sek.	60 Sek.	X	X	✓	✓	danach trockenwischen**
	2	Desinfektionsspray Flächen, 400 ml	min. 30/60 Sek.	60 Sek.	✓	X	✓	✓	danach trockenwischen**
	3	Desinfektionstücher für Flächen, 40 St	2/5 Min.	5 Min.	X	✓	✓	✓*	
	4	Desinfektionstücher, 15 St	30 Sek./1 Min./3 Min.	3 Min.	X	✓	✓	✓*	
Sagrotan	5	Desinfektion Hygienespray, 250 ml	min. 30 Sek./max. 5 Min.	5 Min.	X	✓	✓	✓	feucht abwischen und danach trockenwischen**
	6	Desinfektion Hygienespray, 400 ml	min. 60 Sek./max. 15 Min.	10 Min.	X	✓	✓	✓	
	7	Desinfektion Reiniger, 500 ml	min. 5 Min.	5 Min.	X	✓	✓	✓	danach trockenwischen**
	8	Desinfektion feuchte Tücher, 15 St	min. 5 Min.	5 Min.	✓	✓	✓	✓	
GUT&GÜNSTIG	9	Hygiene Reinigungstücher, 40 St	2/5 Min.	5 Min.	✓	X	✓	✓*	
	10	Hygiene Spray, 250 ml	min. 30 Sek.	60 Sek.	✓	✓	✓	✓*	trocknen lassen oder trockenwischen**
	11	Hygiene Spray, 400 ml	min. 30/ max. 60 Sek.	60 Sek.	✓	✓	✓	✓	danach trockenwischen**
	12	Hygiene Spray, 750 ml	5 Min.	5 Min.	X	✓	✓	✓	feucht abwischen und danach trockenwischen**
domol	13	Hygiene-Spray, 250 ml	30 Sek.	30 Sek.	X	✓	✓	✓	feucht abwischen und danach trockenwischen**
	14	Hygiene-Spray, 400 ml	min. 30 Sek./max. 5 Min.	5 Min.	X	✓	✓	✓	
	15	Hygienetücher, 15 St	30 Sek.	30 Sek.	✓	✓	✓	✓*	bei Bedarf feucht abwischen und danach trockenwischen**
blik	16	Hygiene Spray, 250 ml	30 Sek.	30 Sek.	✓	✓	✓	✓	
REWE Beste Wahl	17	Hygiene Spray, 250 ml	30 Sek.	30 Sek.	✓	✓	✓	✓	bei Bedarf feucht abwischen und danach trockenwischen**
	18	Hygiene Reinigungstücher, 40 St	30 Sek.	30 Sek.	✓	✓	✓	✓*	
SOS	19	Desinfektionsspray INTENSE, 250 ml	2-15 Min.	5 Min.	X	X	✓	✓	feucht abwischen und danach trockenwischen**

*bei Schlierenbildung mit weichem Mikrofaser Tuch trockenwischen, **bitte Polycarbonat grundsätzlich nur mit weichen Mikrofaser Tüchern behandeln, da sonst die Oberfläche verkratzt werden könnte



Da wir auf etwaige Veränderungen von Inhaltsstoffen der Desinfektionsmittel, Schwankungen der Rohstoffe sowie auf die Art der Anwendung keinerlei Einfluss haben, können keine Garantien gegeben werden. Eine Beeinträchtigung der Oberflächen bei Langzeitanwendung ist nicht ausgeschlossen. Bitte melden Sie uns solche Fälle an qm@freistil.com.

DESINFEKTIONSMITTEL FÜR OBERFLÄCHEN

- ⚠ Bitte verwenden Sie das jeweilige Mittel immer vorsichtig und lesen vor dem Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen.
- ⚠ Bewahren Sie Desinfektionsmittel immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf und vermeiden Augenkontakt.
- ⚠ Unabhängig von den hier aufgeführten Produktempfehlungen, sollte immer vor der Anwendung an unauffälliger Stelle getestet werden, um Materialverträglichkeit und Farbbechtheit zu sichern.



DESINFEKTIONSMITTEL FÜR DAS EINGREIFSCHUTZ-ROLLO (LIEFERANTENINFORMATION)

Der an unseren Therapie- und Pflegebetten LISA im Grundmodell enthaltene Eingreifschutz (Rollo) besteht aus einem beschichteten Polyestergewebe. Dieses ist schwerentflammbar und kann entsprechend unseres Lieferanten mit folgenden Desinfektionsmitteln desinfiziert werden:

Hersteller	Produktname	Produktinfo
Hartmann	Bacillo® AF	gebrauchsfertige Lösung

BACILLOL® AF

Anwendungsgebiete

Bacillo® AF ist ein alkoholbasiertes, gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel zur rückstandsfreien Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen von nicht invasiven Medizinprodukten. In Bereichen, in denen eine schnelle Einwirk- und Abtrocknungszeit und eine rückstandsfreie Auftrocknung notwendig ist, sowie im Lebensmittelbereich und in sensiblen produktberührenden Bereichen.

Wirksamkeit

Bakterizid (inkl. Salmonellen und Listerien), levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS.



HINWEISE FÜR ENDVERBRAUCHER



Da wir auf etwaige Veränderungen von Inhaltsstoffen der Desinfektionsmittel, Schwankungen der Rohstoffe sowie auf die Art der Anwendung keinerlei Einfluss haben, können keine Garantien gegeben werden. Eine Beeinträchtigung der Oberflächen bei Langzeitanwendung ist nicht ausgeschlossen. Bitte melden Sie uns solche Fälle an qm@freistil.com.